



etna



CPA

Corona Pandemie

Atemschutz

Atemschutzmaske zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel giftiger bzw. hochgiftiger Stoffe

Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.

HOCHWIRKSAME PLISSEE-ATEMSCHUTZMASKEN VON ETNA

Corona Pandemie Atemschutz CPA

DER CORONA PANDEMIE ATEMSCHUTZ VON ETNA ERREICHT DANK SEINES EFFIZIENTEN FILTERMATERIALS EINE SEHR HOHE FILTERWIRKUNG VON DURCHSCHNITT- LICH 97,6% (BUNDESWEHR) UND 96,5% (DEKRA). DIE HOHE FILTERWIRKUNG IST VON ZUGELASSENEN STELLEN GEPRÜFT UND BESTÄTIGT UND WIRD DAUERHAFT DURCH UNSERE QUALITÄTSSICHERUNG ÜBERWACHT.

PLISSEE-FALTEN FÜR GRÖßERE FILTEROBERFLÄCHE


Das Besondere am etna Corona Pandemie Atemschutz ist das Plisse. Die fein gelegten Falten vergrößern die Oberfläche auf fast das Doppelte im Vergleich zu herkömmlichen Atemschutzmasken.

etna hat eine besondere Technologie entwickelt, um die Masken auf unseren Plissiermaschinen aus der Luftfiltertechnik in dieser praktischen und wirkungsvollen Form herzustellen.

IM VERGLEICH:

HERKÖMMLICHE MASKE AUS DEM BAUMARKT

- geringerer Abscheidegrad
- hoher Atemwiderstand
- nur ca. 270 cm² Filteroberfläche

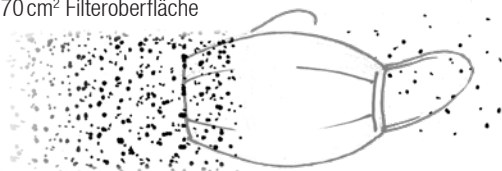


HIGHTECH-FILTERMATERIAL

Gemeinsam mit unseren langjährigen Lieferanten für Filtervlies haben wir die besten Materialien ausgewählt, um ein hocheffizientes Filtermaterial herzustellen, das allen Ansprüchen des Infektionsschutzes gerecht wird.

deutlich
**weniger Atem-
widerstand**

Wirkungsgrad von
> 95%

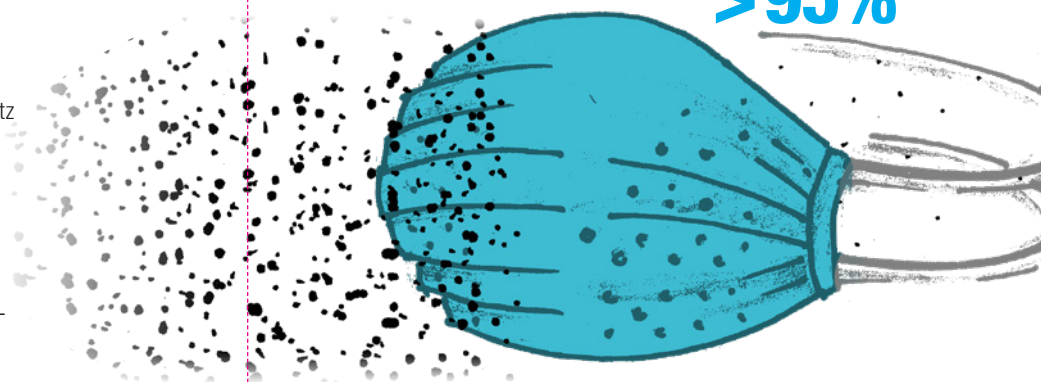

ca. **500 cm²**

Filteroberfläche durch Plisse, das heißt fast doppelt so viel Filterfläche wie bei Vergleichsmasken – **größere Wirkung bei effizientem Materialeinsatz**

FAST 100 % FILTERWIRKUNG

Die Wirkung unseres Corona Pandemie Atemschutzes wurde von der DEKRA sowie dem Wehrwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr geprüft. Das Ergebnis: Die Filterwirkung entspricht mit durchschnittlich 97,6 % (WIS) und 96,5 % (DEKRA) dem FFP2-Abscheidegrad. Zum Vergleich: Viele der momentan erhältlichen KN95 Masken halten im Bereich der kleinsten Partikel nur rund 75 % aller eindringenden Teilchen fern, können Schadstoffe enthalten und werden zum Teil ungeprüft und ohne Prüfzeugnisse auf den Markt gebracht. Die hohe Filterwirkung des etna Corona Pandemie Atemschutzes ist von zugelassenen Stellen geprüft und bestätigt und wird dauerhaft durch unsere Qualitätssicherung überwacht.

etna ist seit vielen Jahren einer von zwei anerkannten Lieferanten der Bundeswehr für ABC-Schutz, worunter auch der Schutz vor Viren (B wie biologisch) fällt.

ETNA IST ZERTIFIZIERT NACH:



Management
System
ISO 9001:2015
SCC**

www.tuv.com
ID 0091004226

WEICHES NASEN-POLSTER

Das Polster dient als zusätzliche Abdichtung unter dem flexiblen Versteifungsbügel. Es schließt rundherum ab, drückt nicht und fühlt sich an der Nase angenehm an. Bei Brillenträgern verhindert das Polster ein Anlaufen der Gläser.



SICHERER ABSCHLUSS UM DEN MUND UND AN DEN SEITEN

Dank seiner speziellen Faltart lässt sich der etna Corona Pandemie Atemschutz so auffächern, dass er sicher um den Mund, das Kinn und die Seiten herum abschließt. So können auch an diesen Stellen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe eindringen oder nach außen gelangen.



SICHERER VERSTEIFUNGS-BÜGEL

Der Bügel wird verwendet, um den Maskenkörper stabil zu gestalten, sobald er entfaltet ist. Durch die flexible Ausführung und das weiche Polster ist die Maske trotz Bügel angenehm zu tragen.






HOHER TRAGKOMFORT UND NIEDRIGER ATEMWIDERSTAND

Aufgrund des geringen Atemwiderstandes und des hohen Tragekomforts können die etna Atemschutzmasken ermüdungsfreier getragen werden als herkömmliche Atemschutzmasken. Eine mögliche Tragedauer von mehreren Stunden wurde ohne Einschränkung der Filterleistung in Versuchen bestätigt.

WARUM KEIN VENTIL?

Der Plisseee-Corona Pandemie Atemschutz von etna hat kein Ventil – mit gutem Grund: Denn durch ein Ventil dringt die Luft beim Ausatmen ungefiltert heraus! Das hochwertige Filtervlies des etna Corona Pandemie Atemschutzes hingegen hält weit über 90 % aller Partikel fern – beim Ein- und beim Ausatmen. So schützt der Corona Pandemie Atemschutz von etna sowohl den Träger als auch seine Kontaktpersonen wirksam vor Viren und Luftschadstoffen.

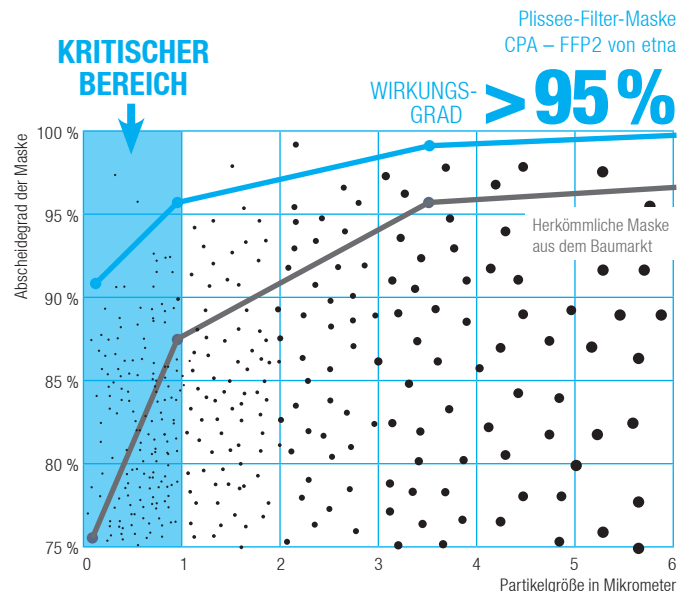

etna

ZERTIFIZIERTER HERSTELLER AUS DEUTSCHLAND MIT ÜBER 50 JAHREN ERFAHRUNG IN DER FILTERTECHNIK

Als Filterhersteller für die Luft- und Klimatechnik hat sich etna seit über 50 Jahren auf die Herstellung von Luftfiltern spezialisiert. Im Bereich Schutztechnik beliefert etna seit vielen Jahren alle führenden deutschen Institutionen für den Katastrophenschutz und die ABC-Abwehr, wozu auch die Abwehr biologischer Gefahrstoffe wie Viren zählt. Alle Produkte werden nach zertifizierten Qualitätsstandards in Deutschland gefertigt und regelmäßig nach höchsten Anforderungen getestet und geprüft.



Die Atemschutzmaske besitzt kein Atemventil und schützt damit sowohl den Träger als auch andere Personen. Sie ist vor allem für die Nutzung im medizinischen Bereich entwickelt worden. Das Material und die Faltung der Maske sollen ein besseres Atmen bei voller Schutzwirkung ermöglichen.

Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre vor Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sorgfältig durch.

Atemschutzgeräte: CPA – FFP2

Zertifizierung: (EU) 2020/403 – PG
nach EN 149:2001 + A1:2009

Notifizierte Stelle: DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Kennnummer: 3417545.10-CPA-Rev.1

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen des Prüfgrundsatzes für CPA Corona Pandemie Atemschutz in Bezug auf DIN EN 149:2001 + A1:2009 für filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel und entspricht den Anforderungen der Empfehlung (EU) 2020/403 sowie anwendbarer lokaler Gesetzgebung. Details zu den Prüfanforderungen und der Zulassung finden Sie auf der Website der ZLS. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung und alle Warnhinweise.

AUFSETZANLEITUNG

1. Formen Sie den Nasenclip mit den Händen vor, damit dieser in etwa Ihrer Nasenform entspricht.

2. Die Maske über Mund und Nase halten und die Befestigungsbänder um den Kopf legen. Das untere Befestigungsband sollte um den Nacken verlaufen. Das obere Befestigungsband sollte oberhalb der Ohren um den Hinterkopf verlaufen.



3. Falten Sie die Maske nach oben über die Nase und unten über das Kinn auf. Stellen Sie sicher, dass die Maske komplett aufgeklappt ist.



4. Passen Sie den Naseclip an Ihre Nase an und stellen Sie sicher, dass die Maske eng anliegt.

Einen festen und eng anliegenden Sitz können Sie überprüfen, indem Sie die Maske mit beiden Händen umschließen, tief einatmen und kräftig ausatmen.

Bei Luftaustritt am Nasenbügel muss dieser stärker angedrückt werden. Bei anderen undichten Stellen den Sitz der Maske leicht verändern und der Gesichtsform anpassen.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Achtung: Gemäß EN 149:2001+A1:2009 werden filtrierende Halbmasken in drei Klassen eingeteilt: FFP1, FFP2 und FFP3. Bevor Sie die folgenden Informationen lesen, prüfen Sie die Klasse des ausgewählten Atemschutzgerätes. Dies ist auf der Verpackung und dem Atemschutzgerät selbst angegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das geeignete Atemschutzgerät auszuwählen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Prüfung vor Gebrauch: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die filtrierende Halbmaske einschließlich aller Bestandteile keine Löcher, Risse oder sonstige Schäden aufweist. Haben Sie einen Schaden entdeckt, verwenden Sie diese Maske auf keinen Fall. Benutzen Sie eine neue Maske.

Die Atemschutzmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen. Setzen Sie das Atemschutzgerät gemäß der Aufsetzanleitung auf und prüfen Sie dieses auf Dichtheit, bevor Sie den kontaminierten Bereich betreten.

Tragen Sie das Atemschutzgerät, solange Sie den Schadstoffen ausgesetzt sind. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß dieser Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Insbesondere sind die Einsatzregeln gemäß BGR 190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“ zu beachten.

Wichtig: Tauschen Sie die Maske sofort aus, wenn das Atemschutzgerät im Gefahrenbereich abgesetzt wurde, das Atmen schwieriger wird oder die Maske beschädigt oder so verformt ist, dass eine optimale Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist. Maske nur gemäß dieser Aufsetzanleitung benutzen.

WARNHINWEISE

Eine Missachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäße Anwendung dieses Produktes können die Wirksamkeit reduzieren und zu ernsthaften oder lebensgefährlichen Erkrankungen oder dauerhaften Schäden führen. Eine sorgfältig ausgesuchte Maske ist essenziell zum Schutz Ihrer Gesundheit. Vor der Anwendung dieser Maske konsultieren Sie eine entsprechende Sicherheitsorganisation, um festzustellen, ob diese Maske den Anforderungen des geplanten Einsatzbereiches entspricht.

Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Die Atemschutzgeräte nur in ausreichend belüfteten Räumen mit genügend hohem Sauerstoffgehalt verwenden. Nicht verwenden, wenn die Atmosphäre weniger als 17 % Sauerstoff enthält. Nicht in explosiver Atmosphäre verwenden.

Der Maskenträger muss den funktionsgerechten Gebrauch und die praktische Anwendung kennen. Gesichtshaare sowie spezielle Charakteristika der Gesichtsform können u. U. die Wirksamkeit dieser Maske reduzieren.

Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen, wenn (a) das Atem schwierig wird oder (b) Schwindel oder Erschöpfung auftreten.

An der Maske dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.


Zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Keine Pflege notwendig. Nach Gebrauch fachgerecht entsorgen.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Verwenden Sie zur Lagerung und zum Transport die Originalverpackung und schützen Sie die Maske vor mechanischen und chemischen Risiken, Sonneneinstrahlung und Schmutz.

Kennzeichnung: NR – nicht wiederverwendbar (nach einer Schicht entsorgen)

Ablaufdatum: siehe Verpackung

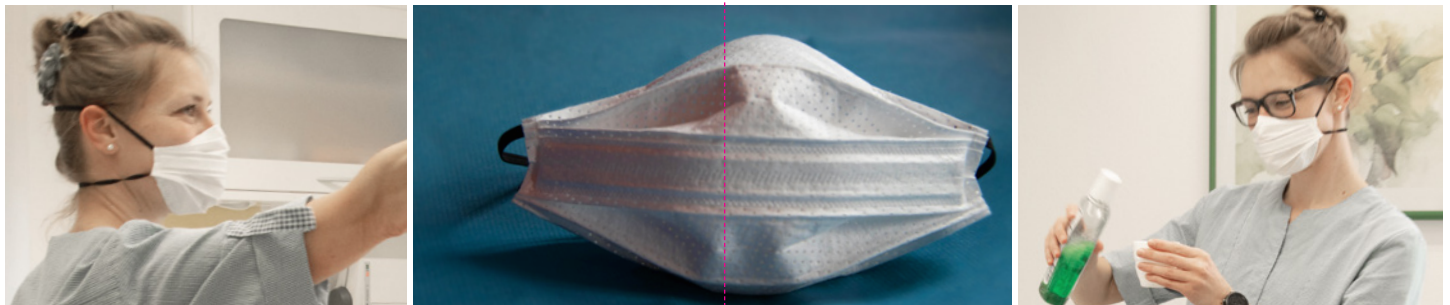

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Filterwirkung größer als 95 %
- Hightech-Filtermaterial
- Plissee-Falten für größere Filteroberfläche – fast doppelt so groß wie herkömmliche Masken
- geprüft von Dekra und Bundeswehr
- zertifizierter Hersteller aus Deutschland mit über 50 Jahren Erfahrung in der Filtertechnik
- lange Tragedauer
- deutlich niedrigerer Atemwiderstand
- umweltfreundlich durch effiziente Materialnutzung
- angenehmes Tragegefühl durch weiches Nasen-Polster
- verhindert das Anlaufen von Brillengläsern
- sicherer Versteifungs-Bügel
- sicherer Abschluss um den Mund und an den Seiten
- ventillfrei für Schutz von Träger und Kontaktpersonen

**BITTE BEWERTEN SIE
UNSER PRODUKT:**

www.surveymonkey.de/r/MM5Y389



etna GmbH

Colmarer Straße 11 · 60528 Frankfurt/Main

Fon: +49 (0) 69 40351-200

Fax: +49 (0) 69 40351-386

schutztechnik@etna.de

www.etna.de

ONLINE KAUFEN:

www.etnaprotect.de

etna